
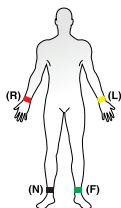


# GUIA RÁPIDO CARDIOCARE

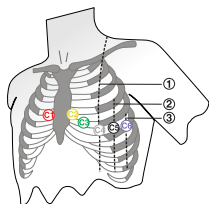

## Eletrodos Precordiais

- 1 Linha Clavicular Central
- 2 Linha Axilar Frontal
- 3 Linha Axilar Central

## Eletrodos de Membros

- Red (R) = Braço Direito
- Yellow (L) = Braço Esquerdo
- Black (N) = Perna Direita
- Green (F) = Perna Esquerda

- \* Conecte o cabo paciente de 10 vias (conforme a figura)
- \* Quando a luz READY acender, inicie o exame

## 1 Impressão Automática

0  $\frac{OPR}{REC}$

Após acionar a tecla, aguarde 10 segundos e o ECG será impresso de forma automática.

## 2 Impressão Manual

9  $\frac{WXY}{MON}$

Iniciar



Parar

## 3 Imprimir em outros formatos

Você pode copiar dados armazenados do ECG após alterar a configuração.

1  $\frac{QZ}{SENS}$

ou

6  $\frac{MNO}{FORM}$

ou

7  $\frac{PRS}{LEAD}$



$\frac{ESC}{COPY}$

Ganho (sensibilidade) ou Impressão em (3, 6, 12 canais) ou Derivações  $\Rightarrow$  ESC

## 4 Configuração para papel fax (modo grade)



Menu  $\Rightarrow$  Seta 2 vezes  $\Rightarrow$  Escolha o modo IMP  $\Rightarrow$

Seta 2 vezes  $\Rightarrow$  Escolha GRADE ON  $\Rightarrow$  Sair

## 5 Habilitar laudo interpretativo



Menu  $\Rightarrow$  Seta 2 vezes  $\Rightarrow$  Escolha o modo PRN  $\Rightarrow$

Seta para esquerda  $\Rightarrow$  Escolha DIAG ON  $\Rightarrow$  Sair

## 6 Configuração padrão

$\mu$   $\neq$   $\times$   $\approx$   
10 25 on off  
--- 6ch+1 II



CH

RHY