
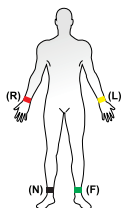


GUIA RÁPIDO CARDIO7

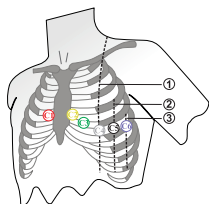


Eletrodos Precordiais

- ① Linha Clavicular Central
- ② Linha Axilar Frontal
- ③ Linha Axilar Central

Eletrodos de Membros

- (R) = Braço Direito
- (L) = Braço Esquerdo
- (N) = Perna Direita
- (F) = Perna Esquerda

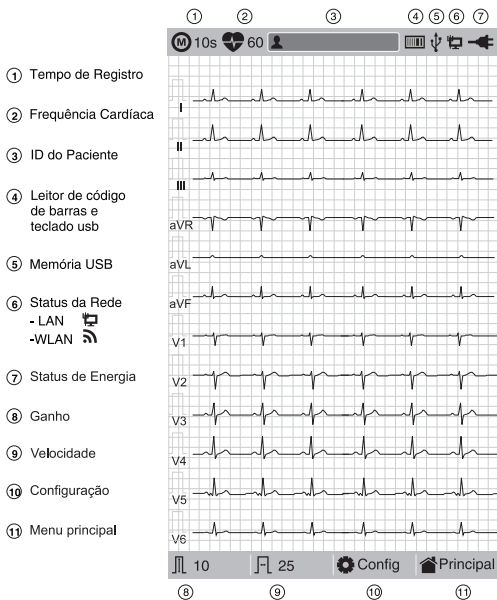

INICIE A IMPRESSÃO SOMENTE APÓS OBTER TRAÇADO ESTÁVEL

1 Imprimir, Gravar e/ou Exportar ECG



AUTO

Após 10 segundos, o relatório será impresso de forma automática. (Tamanho A4)

2 Impressão em Tempo Real



RHYTHM

Iniciar



ESC

Parar

3 Imprimir em outros formatos (Config ⇒ ECG ⇒ Imprimir)

Definições da Impressora

Monitor de 12Canais	① Formato Mon. contínuo	Grade Desativada
② Registro de 3Canais + 3	Papel Tamanho A4	Impressão Normal
③ Bata Relatório Desativada	Ritmo II V1 V5	
OK	Cancelar	Padrão

① Formato Monitor: Contínuo / A4

② Formato do Registro: 3ch + 1 / 6ch + 1 / 12ch / 3ch + 3

③ Relatórios adicionais Texto / Guia / Vector

4 Configurações de Filtros

Config ⇒ ECG ⇒ Filtro ⇒ OK ⇒ Sair

5 Configuração de Pré-visualização

Config ⇒ ECG ⇒ Pré-visual. ⇒ Ativada/Desativada ⇒ OK ⇒ Sair