
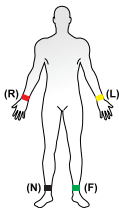


# GUIA RÁPIDO CARDIOTOUCH

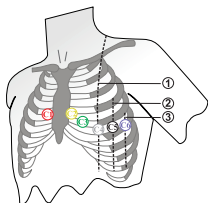


## Eletrodos Precordiais

- ① Linha Clavicular Central
- ② Linha Axilar Frontal
- ③ Linha Axilar Central

## Eletrodos de Membros

- (R) = Braço Direito
- (L) = Braço Esquerdo
- (N) = Perna Direita
- (F) = Perna Esquerda

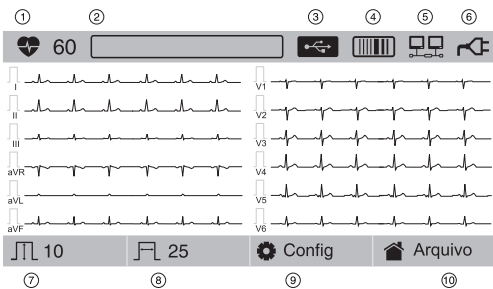

- ① Frequência Cardíaca
- ② ID do Paciente
- ③ Memória USB
- ④ Leitor de Código de Barras e Teclado
- ⑤ Status da Rede: LAN WLAN
- ⑥ Status de Energia
- ⑦ Ganho
- ⑧ Velocidade
- ⑨ Configuração
- ⑩ Arquivo

### INICIE A IMPRESSÃO SOMENTE APÓS OBTER TRAÇADO ESTÁVEL

#### 1 Imprimir, Gravar e/ou Exportar ECG



**AUTO**

Após 10 segundos, o relatório será impresso de forma automática. (Tamanho A4)

#### 2 Impressão em Tempo Real



**RHYTHM**  
Iniciar



**ESC**  
Parar

#### 3 Imprimir em outros formatos ( Config ⇒ ECG ⇒ Imprimir)

**Definições da Impressora**

Monitor de 12Canais	① Formato Mon. contínuo	Grade Desativada
② Registro de 3Canais + 3	Papel Tamanho A4	Impressão Normal
③ Bata Relatório Desativada	Ritmo II V1 V5	
OK	Cancelar	Padrão

- ① Formato Monitor: Contínuo / A4
- ② Formato do Registro: 3ch + 1 / 6ch + 1 / 12ch / 3ch + 3
- ③ Relatórios Adicionais: Texto / Guia / Vector

#### 4 Configurações de Filtros

Config ⇒ ECG ⇒ Filtro ⇒ OK ⇒ Sair