

Guia de instalação para Software Cardio Sync1.01



Precauções de instalação

Observe os seguintes aspectos ao instalar o Cardio P1

- Utilize o equipamento em temperatura ambiente de 10~40°C e umidade de 30~85%.
- Verifique a conexão do cabo USB e manuseie o cabo do paciente com cuidado.
- Manuseie o equipamento com cuidado, pois ele é sensível a impactos.
- Instale o equipamento em local com temperatura e umidade adequadas, longe de poeira e materiais inflamáveis.

Requisito mínimo de software

Instale o programa em um PC que atenda às especificações mínimas abaixo.


Sistema operacional	Windows 10 ou superior
Resolução da Tela	1.920 x 1.080
CPU	Core2Duo 1,86 GHz
RAM	2 GB
Adaptador gráfico	Memória RAM VGA 256 MB 1.600 x 900
Disco rígido	500 GB
Velocidade da LAN	10 Mbps
# de USB	2

Existem dois arquivos para operar o Cardio Sync corretamente.


1. Instale primeiro o programa do servidor SQL: **“SqlLocalDB”**
2. Em seguida, instale o programa principal Cardio Sync: **“CardioSync ECG 1.01”**

Como instalar o software


1. Feche todos os aplicativos antes de iniciar a instalação.
2. Execute o “SqlLocalDB.msi”
3. Siga as instruções abaixo de acordo com cada etapa.

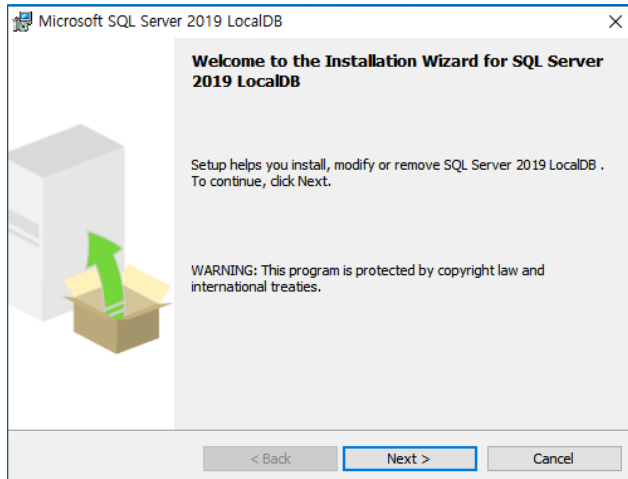


<Passo 1>

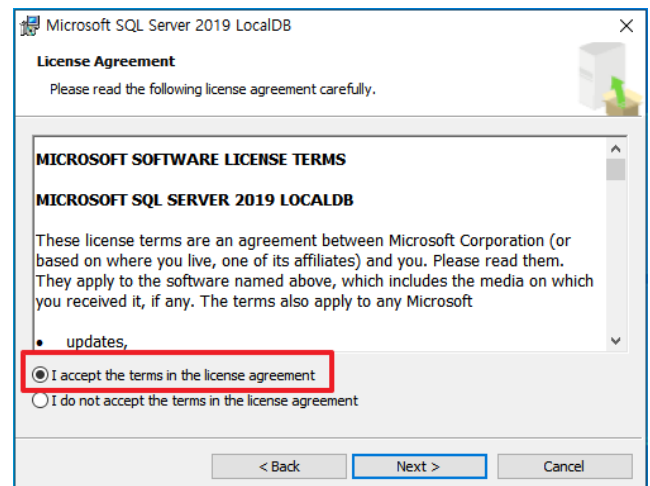


<Passo 2>

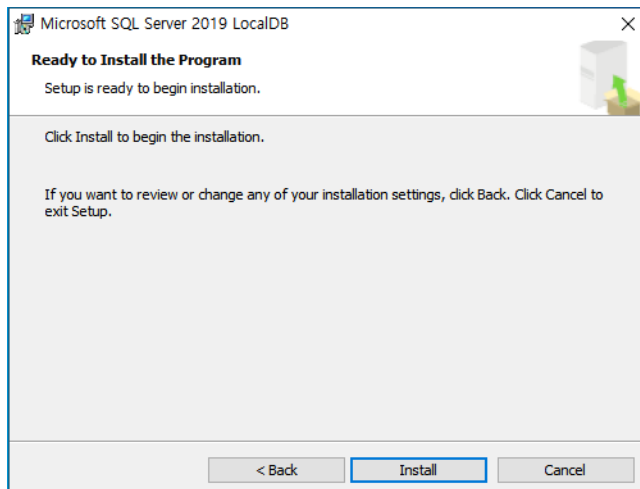

<Passo 3>

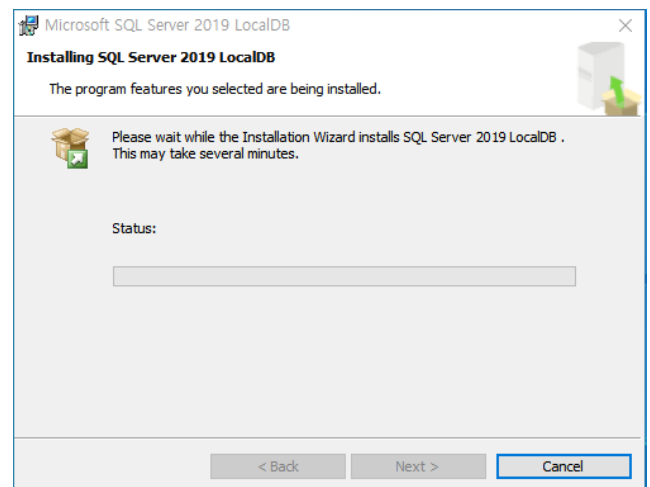


<Passo 4>

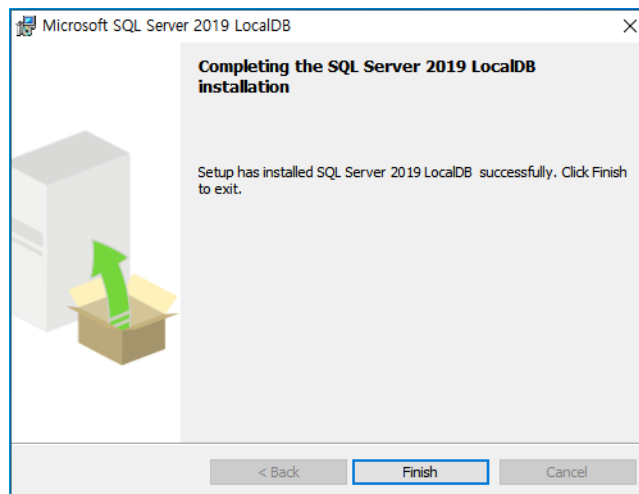


<Passo 5>

4. Execute “setup.exe” ou “Cardio P1 ECG_X.XX.XXX_YYYYMMDD.msi”


5. Siga as instruções abaixo de acordo com cada etapa.

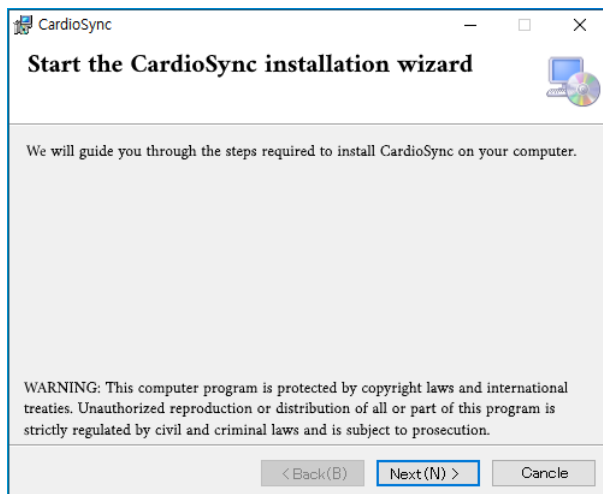


<Passo 1>

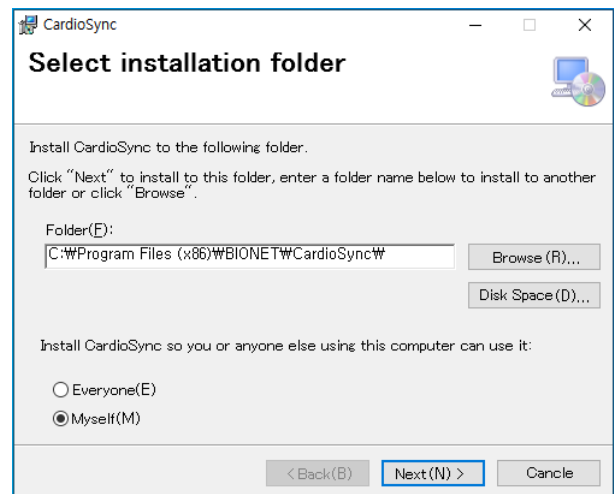


<Passo 2>

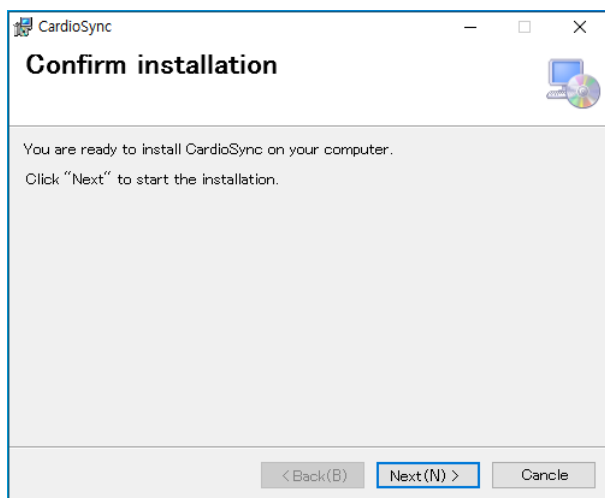

<Passo 3>

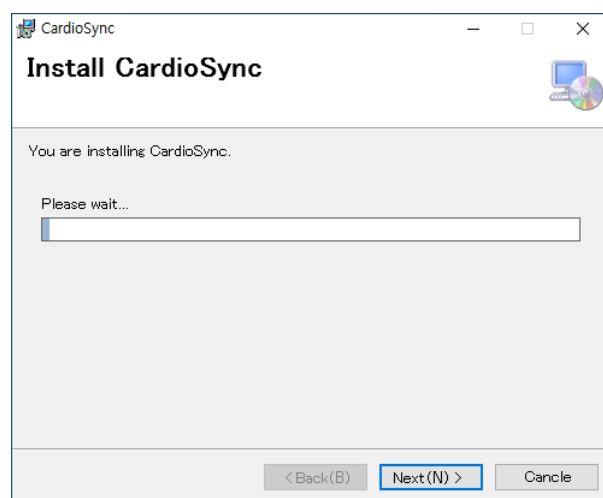

<Passo 4>

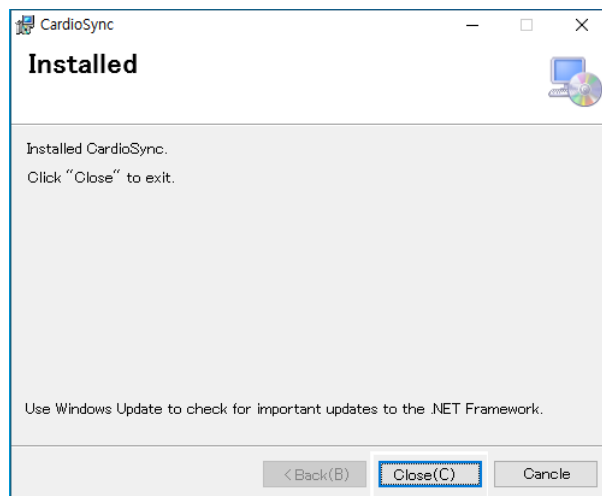

<Passo 5>

Conexão de energia

Conecte o cabo USB no PC e na conexão lateral do Cardio P1.

Conexão do cabo do paciente

- Insira o cabo do paciente no conector localizado na parte inferior da unidade principal.
- Certifique-se de conectar o eletrodo de membro aos terminais em RL(N), LL(F), RA(R) e

LA(L) do paciente e os eletrodos do tórax aos terminais em V1(C1), V2(C2), V3(C3), V4(C4), V5(C5) e V6(C6).

Aviso

Não são permitidas alterações neste equipamento.

Não desmonte ou modifique este equipamento sem a aprovação do fabricante.

O reparo ou desmontagem do equipamento só poderá ser realizado por pessoas qualificadas.

A Bionet não se responsabiliza por quaisquer problemas decorrentes da desmontagem e modificação do equipamento por pessoa não qualificada.


Precauções gerais

Esteja ciente das seguintes diretrizes para garantir o uso seguro do software.

- Use senhas fortes: escolha uma senha forte que inclua uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Nunca use a mesma senha para várias contas.
- Use um software antivírus: instale um programa antivírus confiável e execute verificações regulares para manter seu computador protegido contra malware e vírus.
- Faça backup dos seus dados: faça backup regularmente dos seus arquivos importantes em um disco rígido externo ou armazenamento em nuvem para evitar perda de dados.

Sistema de Início

Depois que tudo estiver pronto, execute o software e você verá a tela de login conforme imagem abaixo.

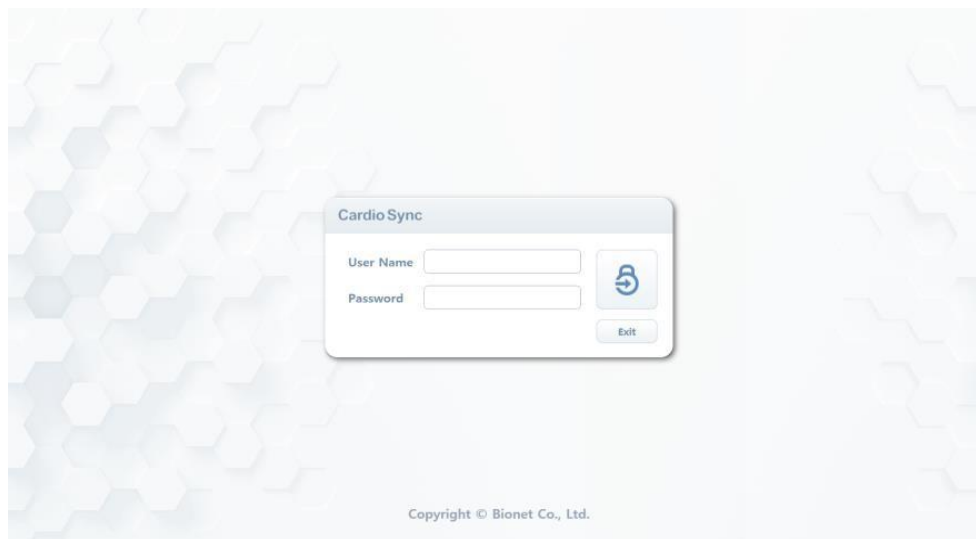

Digite seu ID e senha.

Após o login, a tela do menu aparecerá conforme mostrado abaixo.

